

nebial 3% KIT **con Spray-sol Pediatrico®**


Flaconcini di soluzione ipertonica al 3% con acido ialuronico

NEBIAL 3% KIT È UN PRODOTTO INDICATO PER LA DETERSIONE ANCHE QUOTIDIANA DELLE FOSSE NASALI SOPRATTUTTO IN CASO DI:

- Raffreddore
- Rinite allergica
- Sinusite
- In tutte le situazioni di congestione delle mucose nasali

SPRAY-SOL NEBULIZZA IN PROFONDITÀ

- La soluzione nebulizzata con Spray-sol® arriva anche nella regione posteriore e superiore delle cavità nasali
- Un lavaggio in profondità con soluzione ipertonica aiuta a liberare il naso chiuso facilitando la respirazione ed a prevenire il ristagno del muco, favorendo il miglioramento del quadro clinico

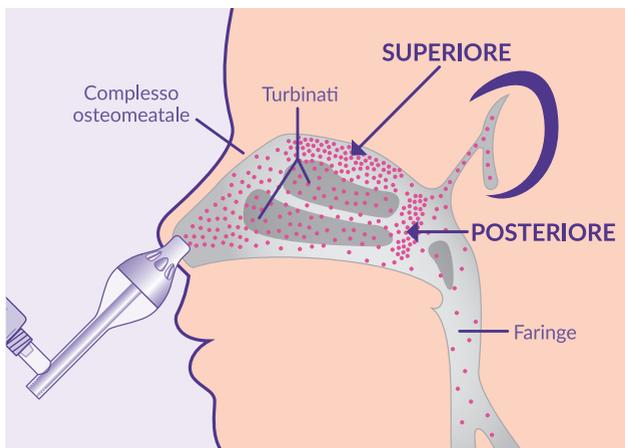

STUDIATO PER I BIMBI

- Permette la nebulizzazione della soluzione in pochi secondi
- Non servono elettricità né mascherine
- È igienico: si lava e si può riutilizzare
- Grazie alle piccole dimensioni, lo puoi portare con te
- L'erogatore è in morbido materiale colorato
- La forma è appositamente studiata per la narice del bimbo

**IN POCHI SECONDI
E SENZA RUMORE**



2 secondi
per narice



5 ml in 4 sec


buona

www.buona.it


COME USARE NEBIAL 3% KIT



1. Collegare il flaconcino alla siringa inclusa nella confezione ed aspirare la soluzione da nebulizzare.

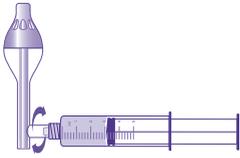


2. Fissare la siringa, riempita con la soluzione NEBIAL 3% da nebulizzare, avvitandola all'apposito ugello di ingresso di Spray-sol Pediatrico®.

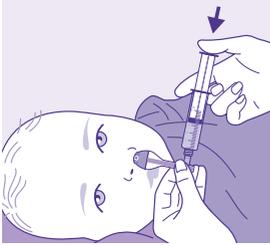

3a. BIMBO PICCOLO:

Nei lattanti e bambini piccoli effettuare il lavaggio in posizione sdraiata su un fianco, tenendo la testa reclinata da un lato e inserendo delicatamente Spray-sol® nella narice superiore. Spingere sul pistone della siringa per nebulizzare la soluzione.

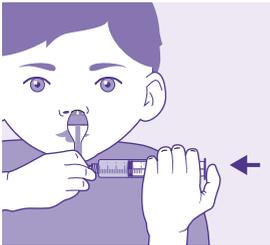

3b. BAMBINI PIÙ GRANDI:

Il bambino più grande può effettuare il lavaggio da solo: inserire Spray-sol® in una narice, mantenendo il busto in posizione eretta e senza reclinare il capo.

4. Ripetete le operazioni del punto 3 anche per l'altra narice, cercando di suddividere equamente la soluzione contenuta nella siringa tra le due narici.

5. Prima di riporre il dispositivo sciacquare la siringa e Spray-sol® sotto acqua corrente.



**NEBIAL 3% KIT con Spray-sol®
e 20 flaconcini monodose
di soluzione ipertonica
con acido ialuronico**

